

# HUMAN +++ PROTECTION

ONRUST. VRIJHEID. VEILIGHEID

## HUMAN PROTECTION KLEDING

Onrust.

Vrijheid.

Veiligheid.

# Human Protection




Human Protection hoofdkantoor








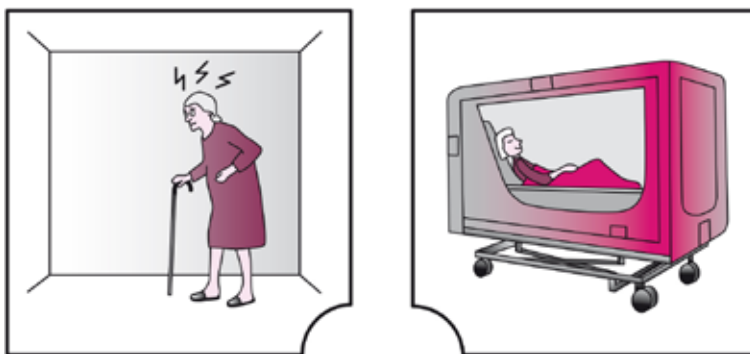



*Human Protection biedt 24/7 producten en diensten die zorgen voor zoveel mogelijk vrijheid en veiligheid voor zorgvragers en zorgverleners bij onrust en risicosituaties in de zorg.*


In zorginstellingen zorgen patiënten en bewoners voor risicovolle situaties die voortkomen uit onrust. Denk hierbij aan valgevaar, dwaalgedrag, uittrekken van medische materiaal, scheur- en smeergedrag, (fysieke) agressie etc.

Het doel van onze oplossingen is het terugdringen van onrust, voorkómen van fixeren en de minst beperkende interventie, het meest inzetten.

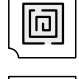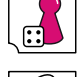

Human Protection biedt oplossingen bij o.a.:

-  Veilig slapen
-  Veilig zitten
-  Valgevaar
-  Uittrekken van medisch materiaal
-  Dwaalgedrag
-  Verveling
-  Delirium
-  Fysieke agressie
-  Scheur- en smeergedrag

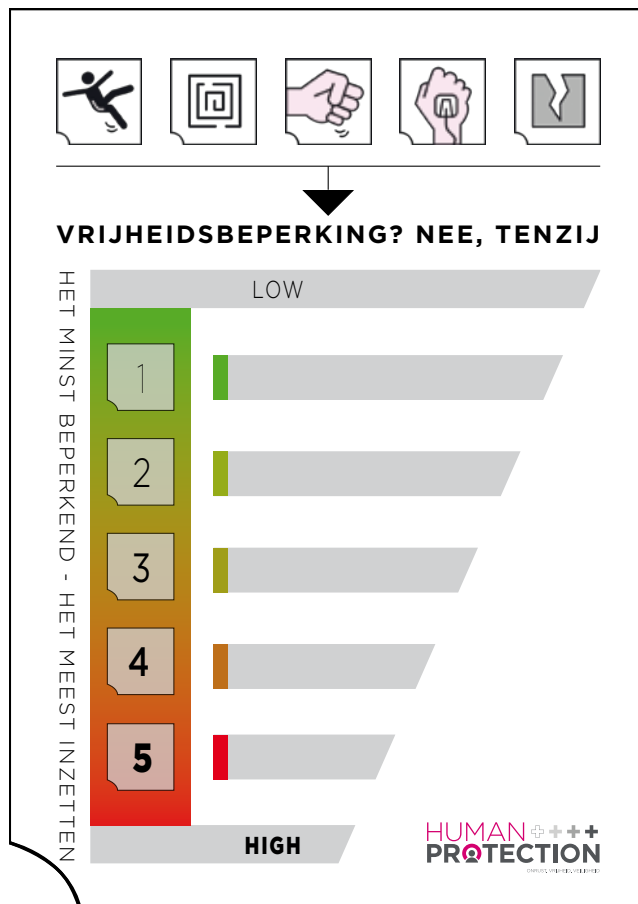

## Inhoudsopgave

● <b>Over Human Protection</b>	<b>4</b>
● <b>Waarom Human Protection kleding?</b>	<b>5</b>
● <b>Standaard oplossingen</b>	<b>6 - 7</b>
Dekens	6
Pakarm	6
Kussen(sloop)	6
Matrashoes	6
Body	7
Hansop	7
● <b>Maatwerk Human Protection</b>	<b>8 - 15</b>
Stappenplan	9
Cases	10 - 13
Scheur- en smeerpakken	14
Slaapzakken	15
● <b>Wasvoorschriften en stofkwaliteiten</b>	<b>16</b>
● <b>ISO13485</b>	<b>17</b>

# Over Human Protection

Human Protection ontwerpt en produceert sinds 1987 kleding en bedtextiel voor specifieke situaties in de gezondheidszorg. Is er bij uw cliënt sprake van vervuילend of destructief gedrag, gericht op zichzelf of op de omgeving? Of wilt u de cliënt gewoon meer comfort bieden? Dan kan de kleding van Human Protection een passende oplossing zijn. Opdrachtgevers uit onder andere de verstandelijke gehandicapten- en verpleeghuiszorg, de ziekenhuizen en de psychiatrie, maken al jaren dankbaar gebruik van Human Protection kleding. Naast beschermende kleding produceert Human Protection een groot aantal verschillende soorten bedtextiel, bruikbaar in bijvoorbeeld comfortroom- en separeersituaties. Bijna alle producten worden in eigen beheer ontworpen en vervaardigd, in ons Tilburgse atelier.



## Functioneel en representatief

Human Protection kleding is functioneel, comfortabel en individueel aan te passen. Wij vinden het belangrijk dat de kleding representatief is, zodat de cliënt zich er prettig in voelt. Comfortabele én beschermende kleding: een grote stap voorwaarts voor cliënt en verzorger.

## Voordeel voor uw instelling en cliënt

Het gebruik van Human Protection kleding kan de fysieke belasting en werkdruk van de zorgverlener terugdringen en een flinke bijdrage leveren in de doelmatigheid van de zorg. Dagelijkse handelingen rondom wassen, verschonen, wisselen van incontinentiemateriaal, fixatie en aan- en uitkleden van cliënten met bewegingsbeperkingen, verwardheid en/of pijn vormen een belangrijke bron van fysieke overbelasting. Uit onze jarenlange ervaring blijkt dat Human Protection kleding hierin verbetering aan kan brengen.

Daarnaast kan Human Protection kleding een bijdrage leveren in het terugdringen van het aantal fysieke fixaties binnen uw instelling. Human Protection kleding brengt veel cliënten meer comfort, minder pijn en meer autonomie.

## Pasklare oplossingen

In meer dan 25 jaar hebben wij een enorme expertise opgedaan op het gebied van beschermende kleding en textiel. Stel gerust uw vragen. Human Protection reikt u graag pasklare oplossingen aan.



Human Protection B.V.  
Droogdokkeneiland 15  
5026 SP Tilburg  
T: +31 (0) 13 536 38 07  
E: [info@humanprotection.nl](mailto:info@humanprotection.nl)  
[www.humanprotection.nl](http://www.humanprotection.nl)



# Waarom Human Protection kleding?

## Een humaan alternatief

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben vaak moeite zich te kleden. Gewone kleding past niet en speciale kleding ziet er niet mooi uit. Bovendien moet de kleding in sommige gevallen bescherming bieden. Middels de Human Protection kleding willen wij het kledingprobleem van mensen met een zorgbehoefte oplossen. Door producten te ontwikkelen die een zo humaan mogelijk alternatief bieden voor de kleding en omgeving van de cliënt.

### **Samenwerking met de zorgsector**

We ontwikkelen de producten van Human Protection in nauwe samenwerking met de markt. Kennis uit de zorg is vertaald in aanpassingen die de kleding aangenamer, veiliger en gebruiksvriendelijker maken. De kleding van Human Protection is bedoeld voor mensen met een specifieke gedragsproblematiek, bijvoorbeeld scheuren, rumineren, automutilatie, pica-gedrag en smeren. Human Protection is in veel van dit soort situaties een humane vervanger van Zweedse banden, bratex-banden, pols- en enkelbanden, armkokers, fixatiebanden, dwangbuizen en canvas-kleding.

### **Voordelen | Representatief, comfortabel en van goede kwaliteit**

De beschermende kleding van Human Protection is gericht op zoveel mogelijk bewegingsvrijheid, hygiëne, duurzaamheid en behandelgemak. Hierdoor krijgt u als verpleger of verzorger uw handen vrij voor de overige onderdelen van het behandelplan.

### **Op maat gemaakt**

Human Protection biedt naast standaardconfectie ook maatwerk. Tijdens het ontwerpen staan het individu en zijn problematiek centraal. Aanpassingen in kleur, maat en ontwerp zijn mogelijk en zo ontstaan op het lijf geschreven, functionele kledingstukken.

### **Comfortabel**

De tijd van de stijve, oncomfortabele kleding die veelal grijs en grauw is, is nu echt voorbij. Human Protection is functioneel en aantrekkelijk.

### **Kwaliteitstoffen**

Human Protection werkt uitsluitend met de allerbeste materialen. Ons polyester/katoen is verkrijgbaar in een enkellaagse of dubbellaagse uitvoering en leverbaar in verschillende kleuren. We hebben gekozen voor de combinatie polyester/katoenen vezels vanwege de vele voordelen in gebruik en onderhoud. Het materiaal is licht in gewicht, sterk, krimpt nagenoeg niet en is soepel. Vergeleken met het vaak gebruikte canvas is dit een groot voordeel. Veel moeilijk scheurbaar materiaal verkleurt en wordt op den duur steeds stugger. Met alle negatieve gevolgen en prikkels vandien. Voor specifieke toepassingen werken we in de Human Protection kleding lijn ook met dyneema of dubbeldoek. Deze lastig-scheurbare technische vezels zijn te verkrijgen in twee kleuren. Daarnaast is TecaSafe ook mogelijk. TecaSafe is vlamwerend, hitte reducerend en beschermd tegen chemicaliën.






# Standaard oplossingen Human Protection

Ons bedtextiel en kleding is gemaakt van moeilijk scheurbaar materiaal. Bij cliënten kan dit de prikkel tot scheuren verminderen en het bevordert de nachtrust: de bewoner blijft warm. Doordat er minder schade optreedt aan materialen, heeft het gebruik van dit soort bedtextiel en kleding ook een positieve invloed op de kosten.

Dekens moeilijk scheurbaar	Vulling	Materiaal	Maten	Foto
Moeilijk scheurbaar deken 634-005	Nee	Dubbeldoek	140 x 210cm	
Moeilijk scheurbaar deken F211.600	Ja	Dubbeldoek	140 x 210cm	
Moeilijk scheurbaar deken 614-005	Nee	Dyneema	140 x 210cm	
Moeilijk scheurbaar deken 614-003	Ja	Dyneema	140 x 210cm	

Pakarm	Vulling	Materiaal	Maten	Foto
Pakarm.M (maat M) Pakarm.L (maat L)	Fiberfill	Polyester/katoen	M & L	

Kussen(sloop) moeilijk scheurbaar	Materiaal	Maten	Foto
Doorademkussen incl. sloop F213.600 614-030	Dubbeldoek Dyneema	60 x 70 cm	
Moeilijk scheurbaar kussensloop incl. rits en slot 634-013 614-013	Dubbeldoek Dyneema	60 x 70 cm	

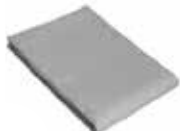
Matrashoes moeilijk scheurbaar incl. afritsbare bovenkant	Materiaal	Maten	Foto
634-018 614-018 Let op! Geef bij dit artikel altijd de hoogte van het matras door	Dubbeldoek Dyneema	90 x 200 cm	

Overige stofkwaliteiten/materialen op aanvraag mogelijk.

Artikel-nummer	2010	2020	2025	2030	2031	2040	2050
<b>Omschrijving</b>	Body	Kinderbody	Kinderbody	Body korte pijpen	Body lange pijpen	Body	Body korte pijpen
<b>Kleur</b>	Wit, Marine, Lavendel, Antraciet	Wit, Marine	Wit	Wit, Marine, Lavendel, Antraciet	Wit, Marine	Wit	Wit, Marine, Lavendel, Antraciet
<b>Sluiting</b>	Drukknopsluiting in kruis	Drukknopsluiting	Ritssluiting	Ritssluiting achterzijde	Sterke ritssluiting achterzijde	Drukknopsluiting in kruis en schouders	Ritssluiting achterzijde en kruis
<b>Maat</b>	S t/m XXL	104 t/m 176	104 t/m 176	S t/m XXXL	S t/m XXL	S t/m XXL	S t/m XXXL



2050

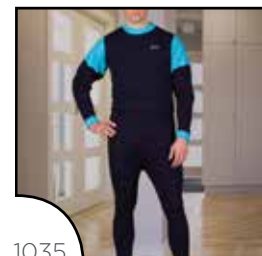

1035

Artikel-nummer	1010	1030	1035	1050	1040	1060
<b>Omschrijving</b>	Hansop tricot lange mouwen en pijpen	Hansop jersey lange mouwen en pijpen	Hansop jersey lange mouwen, pijpen met voet	Hansop jersey met korte mouwen en pijpen	Hansop badstof lange mouwen en pijpen	Kinderhansop tricot zonder voetjes
<b>Kleur</b>	Donkerblauw & groen	Donkerblauw & groen	Donkerblauw & groen	Donkerblauw & groen	Donkerblauw & groen	Donkerblauw & groen
<b>Sluiting</b>	Ritssluiting op de rug <b>1011:</b> extra ritssluiting in het kruis	Ritssluiting rugzijde en een elastiek bandje	Ritssluiting rugzijde	Ritssluiting rugzijde	Ritssluiting rugzijde <b>1041:</b> extra ritssluiting in het kruis	Ritssluiting op de rug
<b>Maat</b>	XS t/m XXL	S t/m XL	S t/m XXXL	S t/m XXXL	S t/m XXXL <b>1041:</b> XS t/m XXXL	128 t/m 176

# Maatwerkoplossingen Human Protection

Human Protection biedt maatwerk oplossingen waarbij de individuele cliënt en de problematiek waarmee hij te maken heeft centraal staat. Zo ontstaan functionele kledingstukken die op het lijf geschreven zijn. Bijna alle maten, kleuren, stofsterktes en aanpassingen zijn mogelijk en kunnen naar wens opgenomen worden in het ontwerp. Het resultaat is een persoonlijke en uitgebalanceerde collectie kleding en bedtextiel voor zowel de dag- als de nachtsituatie.

**Wat is de aanpak bij maatwerk? Om een idee te krijgen gaan we op pad met de technische styliste.**

## De situatie

Bij Human Protection is een vraag binnengekomen over Daniël, een man van ongeveer 40 jaar met een forse gedragsproblematiek. Hij is een cliënt van een grote instelling en woont in een speciaal voor hem ingerichte kamer. Vroeger zou Daniël permanent gefixeerd zijn of in een isoleercel zitten, maar nu kan hij relatief vrij rondlopen in zijn sober ingerichte kamer. Er staat een zitblok van sterk polyester en de wanden zijn bekleed met verend, stootvast materiaal. Verder staan er een tafel en bed en er is een doucheruimte met toilet. Aan de muur hangen enkele camera's die beelden doorgeven aan de personeelskamer van waaruit vijf van deze units 24 uur per dag in de gaten worden gehouden. Daniël is een zichzelf beschadigende cliënt, aan zijn armen zitten kokers zodat hij zichzelf niet kan verwonden. Om hem te douchen of te voeden zijn er altijd twee verzorgers nodig en een achterwacht bij de beeldschermen. Daniël kan namelijk zonder aanleiding plotseling heel agressief worden. Verstandelijk zit hij op het niveau van een tweejarige maar fysiek is het een beer van een kerel. Probleem: het is Daniël gelukt om zijn armkokers zo te bewerken dat hij ze af kan doen. Met alle gevaren van dien, voor zichzelf en zijn omgeving.

## De inventarisatie

De technische styliste brengt vandaag een bezoek aan de instelling. Er moet een betere oplossing gevonden worden om de armkokers op hun plek te houden zonder dat Daniël daar veel last van heeft. Eerst heeft de technische styliste een bespreking met het verplegend personeel over een mogelijke oplossing.

## Maatopname

Vanwege het onberekenbare gedrag van Daniël moet de maatopname snel gebeuren. Twee stevige begeleiders gaan met de technische styliste naar Daniël's kamer. Ze praten eerst op rustige toon met Daniël en laten daarna de technische styliste pas binnen. Hij stoot harde klanken uit maar blijft verder tamelijk rustig. In het kantoor wordt aan de hand van de maatopname een schets gemaakt van de oplossing.

## Offerte

Op korte termijn zal de technische styliste een maatopnameformulier invullen a.d.h.v. de maatopname. Een vrijblijvende offerte wordt uitgewerkt en toegezonden. Na een schriftelijke goedkeuring van de offerte gaat het atelier van Human Protection aan de slag.

## Paskledingstuk

Paskleding wordt gemaakt om de maten en de pasvorm te controleren. Een formulier wordt meegezonden met het kledingstuk om alle bevindingen te kunnen noteren. Aan de hand van het ingevulde formulier en een akkoord gaat het atelier verder met het kledingstuk.

## Proefkledingstuk

Na goedkeuring van het paskledingstuk kan het atelier aan de slag. Dit doen zij aan de hand van de briefing en schets van de technische styliste. De maten worden ingevoerd en een eerste kledingstuk is snel klaar voor verzending.

## Proefperiode

De instelling gebruikt de nieuwe oplossing enkele weken in de praktijk, waarbij ze goed monitoren of de oplossing goed functioneert, voordat het atelier aan de slag kan met de andere kledingstukken. De **restorder** volgt na goedkeuring van het proefkledingstuk.



1

## Bezoek aan de instelling

- Cliënt in de woonomgeving
- Bespreken van het probleem met verantwoordelijke
- Gezamenlijke eerste oplossing

2

## Maatopname

- We doen een complete maatopname
- We schetsen een maatoplossing

3

## Vrijblijvende offerte

- Na goedkeuring van de offerte gaat Human Protection verder

4

## Paskledingstuk

- We maken een patroon
- We maken een paskledingstuk ter controle van de maten
- Gewenste aanpassingen komen op een pasformulier

5

## Proefkledingstuk

- We passen het patroon aan
- We maken het eerste proefkledingstuk
- Op een proefformulier komen uw bevindingen

6

## Restorder

- Na de proefperiode maken we de andere kledingstukken, eventueel met aanpassingen
- Leveringsvoorwaarden van Human Protection zijn van toepassing

# Beschermende kleding voor mensen met een verstandelijke beperking

Herkenbare voorbeelden uit de praktijk: Human Protection is vaak een essentieel onderdeel van een behandelmethodede. Onderstaand zijn vier praktijksituaties geschetst. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit de praktijk van alledag. Ze zullen zeker herkenbaar zijn. In elke situatie speelt Human Protection een rol ter verbetering, zowel voor de bewoner als de verzorger.

## CASE 1: Terugdringen van automutilatie

### **De situatie:**

De bewoner automutilleert. Hij krabt en slaat zichzelf zodanig, dat er een levensbedreigende situatie kan ontstaan.

### **Het belang van de bewoner:**

Hij heeft bescherming nodig tegen zichzelf.

### **Het belang van de verpleging:**

Zij zal uitsluiten dat er een levensbedreigende situatie voor de bewoner ontstaat.

### **Vroegere oplossing:**

De bewoner kreeg, 24 uur per dag, een wit canvas fixatiehes met kokers te dragen.

Het resultaat van deze oplossing is dat er een levensbedreigende situatie wordt uitgesloten. Pijnlijke contracturen in schouders en ellebogen blijken echter wel het gevolg. 's Nachts slaapt de betrokkene slecht vanwege een beperkte bewegingsvrijheid. Drukplekken, afknelling en wondjes zijn het gevolg van armkokers en enkelbandjes.

### **Huidige oplossing:**

In overleg met verzorgenden wordt een fixatiehes ontwikkeld, voor gebruik overdag, waarmee de betrokkene een maximale bewegingsvrijheid heeft. Het gebruik van kokers is niet langer nodig. De verdikte wanten zijn hierbij een extra aanpassing. Daardoor kan men zich moeilijker of in mindere mate hard bijten, slaan, knijpen of aan de haren trekken.

### **De positieve effecten van Human Protection:**

Pijnlijke contracturen worden voorkomen. Een goede nachtrust is verzekerd. De bewoner heeft nu een maximale bewegingsvrijheid. Daardoor is meer afleiding mogelijk en zal hij minder geneigd zijn tot automutileren. Met een lus aan het pak is fixatie met armkokers niet meer nodig, vroeger veroorzaakte dit afknellingen. De bewoner is hanteerbaarder geworden; een aantal bijna voortdurende negatieve prikkels is weggenomen. Voor de verzorgenden betekent dit bovendien dat er nu meer ruimte is ontstaan voor de overige onderdelen van het behandelplan.



Fixatiehes incl. dichte mouwen

CASE 2: Een hygiënische oplossing bij smeren

**De situatie:**

De bewoner smeert zich met enige regelmaat onder met ontlasting. Af en toe is er mondcontact met ontlasting.

**Het belang van de bewoner:**

Beschermd worden tegen zichzelf. Er is kans op infecties.

**Het belang van de verpleging:**

Het waarborgen van de hygiëne en kans op infecties neutraliseren. Daarvoor is kleding nodig met minimale krimp, die wasbaar is op een hoge temperatuur. De verpleging is gebaat bij minder schoonmaakwerkzaamheden en bij meer tijd voor het behandelplan.

**Vroegere oplossing:**

De bewoner laten smeren; af en toe fixeren van de armen of de bewoner kleden in een zwaar canvas smeerpak met dichte mouwen en/of broekspijpen. Zowel de armkokers als de enkelbandjes gaven drukplekken, ze knelden af en gaven open wondjes.

Het resultaat van deze oplossing was onhygiënische situaties en kans op infecties. Dat houdt voor de verpleging ook in: vele uren schoonmaken. Zo ontstaan onverwachte pieken in de werkdruk, dat leidt ertoe dat men minder tijd kan besteden aan de bewoners.

**Huidige oplossing:**

Een aangepast comfortabel en representatief kledingstuk in de vorm van een overall. De omvang van de armsgaten, hals en broekspijpen is zo aangepast, dat het voor de betrokken persoon onmogelijk is geworden om bij zijn ontlasting te komen.

**De positieve effecten van Human Protection:**

Met Human Protection is de hygiëne gewaarborgd en de kans op infecties geneutraliseerd. Er ontstaan geen nieuwe drukplekken of open wondjes meer. Er is meer tijd beschikbaar voor aandacht aan de bewoners. Een maatwerk optie is dat de pakken tussen de benen opengeritst kunnen worden. Zo is de bewoner vlotter te verschonen. Vooral 's nachts is dit een vooruitgang. De bewoner hoeft bij het verschonen niet meer uit bed gehaald te worden omdat eerst nagenoeg het gehele pak uitgetrokken diende te worden. Er is met de overall van Human Protection nog slechts een eenvoudige ritsbeweging nodig. Zo voorkomt u dat de bewoner klaarwakker wordt en daarna weer moeilijk in slaap valt. Er is meer maatwerk mogelijk a.d.h.v. maatopname met een technisch styliste.



Fixatielipjes

### CASE 3: Scheuren van kleding

#### **De situatie:**

De bewoner scheurt zijn kleding kapot.

#### **Het belang van de bewoner:**

Deze heeft primair bescherming tegen zichzelf nodig. Immers, als door gescheurd textiel de warmtefunctie van de kleding vervalt, kan kou- en de gevolgen ervan- het effect zijn. Bovendien is ook een meer representatieve uitstraling voor de bewoner van belang.

#### **Het belang van de verpleging:**

Met het voorkomen van het scheuren van de kleding weet de verpleging de bewoner tegen zichzelf te beschermen. Op jaarbasis scheurt de betrokken bewoner 150 kledingstukken kapot. Een vermindering van de aanslag op het kledingbudget van de bewoner en de instelling is gewenst.

#### **Vroegere oplossing:**

De betrokken bewoner krijgt verouderde kleding van overige bewoners te dragen. Een groot deel van de dag loopt zij met gedeeltelijk verscheurde kleding rond; in andere gevallen wordt zij zonder kleding op haar kamer geplaatst.

Het resultaat van deze oplossing is dat er irritatie opgewekt kan worden bij familie en verzorgenden naar de bewoner toe, wanneer er wordt gewerkt volgens vroegere maatstaven zoals hierboven beschreven.

#### **Huidige oplossing:**

Het gebruik van enkele representatieve scheurpreventie-kledingstukken, goed vormgegeven en in de kleuren die u aanspreken, te kiezen uit een gevarieerd kleurenaanbod (van toepassing bij materiaal polyester/katoen). De kleding komt tot stand in overleg met de bewoner, familie en verzorgenden.

#### **De positieve effecten van Human Protection:**

Het scheurgedrag is geneutraliseerd. De bewoner oogt representatiever. Na verloop van tijd leert de bewoner om af en toe gewone kleding te dragen. Dit is mogelijk omdat de prikkel tot scheuren ver is afgenomen daar de kleding voor deze onscheurbaar is gebleken. De bewoner heeft zich min of meer neergelegd bij het feit dat het kapotscheuren van de nieuwe kleding nu heel veel moeite kost.



Beleg over rits



Overall dubbeldoek

## CASE 4: Scheuren van dekens en dekbedden

### **De situatie:**

De bewoner scheurt dekens en dekbedden.

### **Het belang van de bewoner:**

Deze moet tegen zichzelf beschermd worden. Door gescheurde dekens en dekbedden kan men het koud krijgen; met daardoor mogelijk een slechte nachtrust.

### **Het belang van de verpleging:**

De verpleging wil graag het scheuren van de dekens voorkomen om de bewoner tegen zichzelf te beschermen. Het scheuren van de dekens gaat meestal gepaard met het kapot scheuren van de eigen kleding. De schade aan de materialen vergt ook nieuwe investeringen. Het is een aanslag op het textiel- en kledingbudget van de instelling; het is wenselijk deze aanslag te verminderen.

### **Vroegere oplossing:**

De keuze werd gemaakt om de bewoner zonder dekens of met gedeeltelijk kapotgescheurde dekens te laten slapen.

Het resultaat van deze oplossing was dat de bewoner geen bescherming tegen zichzelf kreeg (hij bleef scheuren) en voelt zich daarom niet veilig.

### **Huidige oplossing:**

Voor deze bewoner moeilijk-scheurbaar materiaal inzetten. In dit geval dyneema.

### **De positieve effecten van Human Protection:**

Bij het gebruik van Human Protection merkt de bewoner dat het scheuren van de dekens niet meer gaat, waardoor de prikkel tot scheuren vermindert. Hierdoor zal hij een rustigere nacht hebben. De aanschaf van de nieuwe Human Protection dekens vormt uiteindelijk een aanzienlijke besparing op het textiel- en kledingbudget.

Van licht naar zwaar scheurgedrag:

- Polyester/katoen
- Dubbeldoek
- TecaSafe
- Dyneema





## Maatwerk scheur- en smeerpakken

De beschermende kleding van Human Protection biedt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en is gericht op hygiëne, duurzaamheid, draagcomfort en behandelgemak. Onze kledinglijn biedt met name ondersteuning bij scheur- en smeergedrag. Voor andere gedragsproblematieken zoals pica, rumineren en automutilatie (waarbij fysieke fixatie van de cliënt nodig is) komen wij graag in direct contact met de cliënt. Op deze manier kunnen we een goede maatwerkoplossing bieden die ieders veiligheid waarborgt.

Human Protection heeft jarenlang ervaring met maatwerk. En dat merk je. Human Protection maakt kleding voor mannen óf vrouwen. Ieder lichaam is anders. Daarom is er qua maatvoering heel veel mogelijk. Zeker bij smeergedrag is een goed aansluitend kledingstuk erg belangrijk. Onze overalls kunnen duurzame elementen bevatten zoals een verstevigde halsboord (maatwerk), een extra sterke en lange rits en verstevigde armen en polsgaten (maatwerk). Op de rug vindt u twee fixatielipjes. Optioneel kunt u kiezen voor kniestukken en halsbeleg gemaakt van dyneema, een diagonale rits en/of beleg over de rits.

### Maatwerk



Verstevigde halsboord



Bijstuk



Verstevigde boord pols



Afritsbare voetjes



### Maatwerk



Bijstuk in lijntjes doorgestikt



Kniestukken



Beleg over rits



Wanten

Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren overeenkomen met de werkelijke kleuren van de artikelen. Wij doen ons best om dit zoveel mogelijk te benaderen maar de kleuren van geleverde stof en kleur op glad printpapier wijken altijd van elkaar af.

# Maatwerk slaapzakken

De Human Protection slaapzakken kunnen een passende oplossing bieden bij bewoners met plukgedrag, smeergedrag, blootliggen en onrustig gedrag in bed. Deze maatwerk slaapzakken zijn gemaakt van aangenaam, maar stevig materiaal. Ze zijn prettig in gebruik en kunnen worden voorzien van verschillende veiligheidsaspecten, zoals een geïntegreerde onrustband, fixatiebanden aan de onderkant ter voorkoming van rotatie in het bed en eventuele openingen voor sondevoeding.

Slaapzakken	604-022	604-020	634-020	645-014	614-020
Gedrag	Plukken Smeren Krabben	Plukken Smeren Krabben Draden los trekken	Plukken Smeren Krabben Bijten Licht scheuren	Scheuren	Plukken Smeren Krabben Bijten Extreem scheuren
Materiaal	Enkel stof	Dubbel stof	Dubbeldoek	TecaSafe	Dyneema
Sterkte	Mild	Mild	Sterk	Sterk	Zwaar

## Maatwerk



Befje over rits



Geïntegreerde onrustband



Fixatielipjes



Kleurstalen polyester/katoen



## Maatwerk



Halsbeleg van dyneema









Voorzien van mouwen








Fixatiebanden bij de voeten

# Wasvoorschriften en stofkwaliteiten

	Ondergoed	Romper
Model	Boxer slip	Zonder mouw Zonder pijp
Dames/Heren/Unisex	Dames/Heren/Unisex	Unisex
Stofeigenschappen	92% Katoen 8% Elasthan	92% Katoen 8% Elasthan
Brandveiligheid (o.b.v. materiaal)	-	-
Wasvoorschrift		
Draagcomfort */**/**	***	***

	Onderpakje hansop	Onderpakje hansop	Pyjama hansop	Pyjama hansop
Model	Korte mouwen zonder pijp	Lange mouw met pijp	Lange mouw lange pijp	Lange mouw lange pijp
Dames/Heren/Unisex	Unisex	Unisex	Dames	Heren
Stofeigenschappen	92% Katoen 8% Elasthan	92% Katoen 8% Elasthan	60% Katoen 40% elastan	92% Katoen 8% elastan
Brandveiligheid (o.b.v. materiaal)	-	-	-	-
Wasvoorschrift				
Draagcomfort */**/**	**	**	***	*

	Enkelstof	Dubbelstof	Dubbeldoek	TecaSafe	Dyneema
Dames/Heren/Unisex	Unisex	Unisex	Unisex	-	Unisex
Stofeigenschappen	65% Polyester 35% Katoen	65% Polyester 35% Katoen	Trevira	49% Ppan-fr 42% Katoen 5% Para-aramide 3% Pa 1% Static-Control	60% Dyneema 40% Katoen
Brandveiligheid (o.b.v. materiaal)	-	-	+	+++	--
Wasvoorschrift					
Draagcomfort */**/**	**	**	***	**	*
Gedrag	Licht scheur- en smeergedrag	Mild scheur- en smeergedrag	Zwaar scheurgedrag	Zwaar scheurgedrag	Extreem scheur- en bijtgedrag

# ISO 13485

Trots zijn wij op het feit dat wij het hoogste kwaliteitscertificaat hebben behaald voor fabrikanten, leveranciers en distributeurs van medische hulpmiddelen. Human Protection is ISO 13485 gecertificeerd!

## **Wat houdt het ISO 13485 certificaat in?**

ISO 13485 is een internationale norm waaraan fabrikanten, leveranciers en distributeurs van medische hulpmiddelen moeten voldoen om aan te tonen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot medische hulpmiddelen.









# HUMAN +++ PROTECTION

ONRUST. VRIJHEID. VEILIGHEID

---

## Contact met Human Protection B.V.

Interesse in het uitproberen van deze producten? Behoeftte aan een demonstratie of een prijsopgave? Wij staan voor u klaar!

HUMAN +++  
PROTECTION  
ONRUST. VRIJHEID. VEILIGHEID



Droogdokkeneiland 15  
5026 SP Tilburg

t 013-536 38 07  
f 013-535 09 98

info@humanprotection.nl  
**www.humanprotection.nl**