

# Veilig slapen



Het FeelSafe Pro tentbed is een goede oplossing voor patiënten/bewoners die regelmatig het bed verlaten zonder toezicht terwijl ze een hoog risico hebben op een valletsel en geen ziekte inzicht hebben. Indien alle alternatieven overwogen zijn welke minder vrijheidsbeperkend zijn (denk aan alarmering, vloerbedden, FeelSafe Go bedtent) is het FeelSafe Pro tentbed een goede oplossing voor de indicatie zoals hierboven omschreven.

Het FeelSafe Pro tentbed is toegankelijk met een tillift en/of plafondlift en heeft een hoog-laag onderstel waarbij alle ligvlakverstellingen mogelijk zijn. Het FeelSafe Pro tentbed is een zware vrijheidsbeperking maar het voordeel is dat u fysieke fixatie voorkomt en toch de bewoner de benodigde veiligheid kunt bieden.

Het bijkomend voordeel is vaak dat de kleinere, meer overzichtelijke ruimte zorgt voor een gevoel van geborgenheid bij de bewoner en dat daarmee het dag-nachtritme positief beïnvloed kan worden.

Het FeelSafe Pro tentbed:

- Biedt de patiënten/bewoners een veilige slaapomgeving;
- Geeft de patiënten/bewoners bewegingsvrijheid binnen de tent;
- Zorgt voor minder prikkels van buitenaf en geeft daardoor een gevoel van rust en geborgenheid.



FeelSafe Pro - in het kort

- Aan alle zijden toegankelijk voor de verzorging
- Goed toegankelijk met een (passieve) tillift en/of plafondlift
- Elektrisch in hoogte verstelbaar
- Alle ligvlakverstellingen die nodig zijn om maximaal comfort voor de bewoner te kunnen bieden
- Openingen voor infuuslijnen, sondes en katheters
- Gemakkelijk verrijdbaar

#### Technische specificaties

- Hefbereik: 40-80 centimeter
- Afmetingen (in de laagste stand): 160 (h) x 100 (b) x 210 (l) centimeter
- Afmetingen (in de hoogste stand): 200 (h) x 100 (b) x 210 (l) centimeter
- Afmetingen ligvlak: 90 (b) x 200 (l) centimeter
- Maximaal gewicht gebruiker: 165 kilogram

### Aanvullende informatie

- Beschikt over een comfortmatras (inbegrepen in het afgesloten matrascompartiment)
- Beschikt over een opdekmatras met incohoes (voor gebruik in het tentbed)
- Kenmerkt zich door een bepolsterd tentframe, ter voorkoming van letsel
- Is aan alle zijden toegankelijk
- Is elektrisch in hoogte verstelbaar
- Heeft een CPR-hendel
- Is voorzien van ligvlakverstellingen
- Centrale beremming door middel van geïntegreerde wielen
- Is gemakkelijk verplaatsbaar
- Bediening in noodsituaties mogelijk door reserve accu

### Indicaties

Het FeelSafe Pro tentbed is geschikt als een humaner alternatief voor fysieke fixatie of sederende medicatie. Het tentbed vergroot niet alleen de veiligheid, maar zorgt tevens voor een gevoel van veiligheid en bescherming. Indicaties voor de inzet van het FeelSafe Pro tentbed kunnen zijn:

- Ernstige osteoporose;
- Een groot risico op fracturen als gevolg van de klinische omstandigheden;
- Onvoldoende spier- en vetweefsel en subcutaan weefsel om de schok van een val op te vangen;
- Het gebruik van antistollingsmiddelen;
- Een verleden van ernstige trauma's als gevolg van een eerdere val.
- Een verlaagd bewustzijn als gevolg van medicatie of neurale ziekten waardoor de alertheid en balans worden aangetast en/of als gevolg van dementie;
- Visuele of perifere zenuwaandoeningen die van invloed zijn op het bewustzijn of de waarneming van de huidige positie.

### Reiniging

Indien het bed bevuild is met bloed, urine, ontlasting, braaksel wordt vanuit infectiepreventie oogpunt aangeraden het complete bed industrieel te laten reinigen bij Human Protection. (contactgegevens zie onder).

### Service & ondersteuning

Human Protection B.V. is 24/7 bereikbaar. Denk hierbij aan gevallen van een storing aan het onderstel, een beschadiging van de tent of eventueel een aanvraag van een extra bed.

Tussen 08:30 uur en 17:00 uur  
Tussen 17:00 uur en 08:30 uur

+31 (0)13-536 38 07 of mail [info@humanprotection.nl](mailto:info@humanprotection.nl)  
+31 (0)13-523 42 86

### Richtlijnen en normen

Het FeelSafe Pro tentbed is een Medisch Hulpmiddel Klasse I.



### Fabrikant:

Human Protection B.V.  
Droogdokkeneiland 15  
5026 SP Tilburg

### Contactgegevens:

t 013-536 38 07  
f 013-535 09 98

[info@humanprotection.nl](mailto:info@humanprotection.nl)  
[www.humanprotection.nl](http://www.humanprotection.nl)

### **Spied? Bel ons spoednummer: 013-523 42 86**

In spoedsituaties kunnen wij de bedden 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij u leveren. Dus ook op zaterdag en zon- en feestdagen.